



Pletismografía corporal

Maniobras respiratorias


Bucle respiratorio

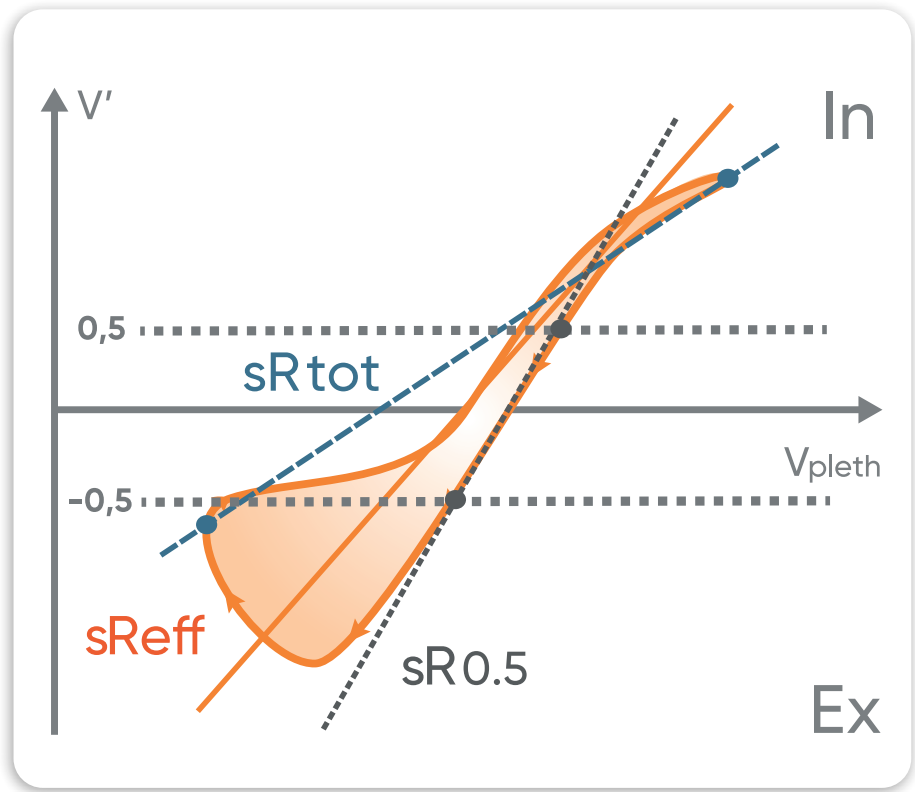

Curva de presión de oclusión

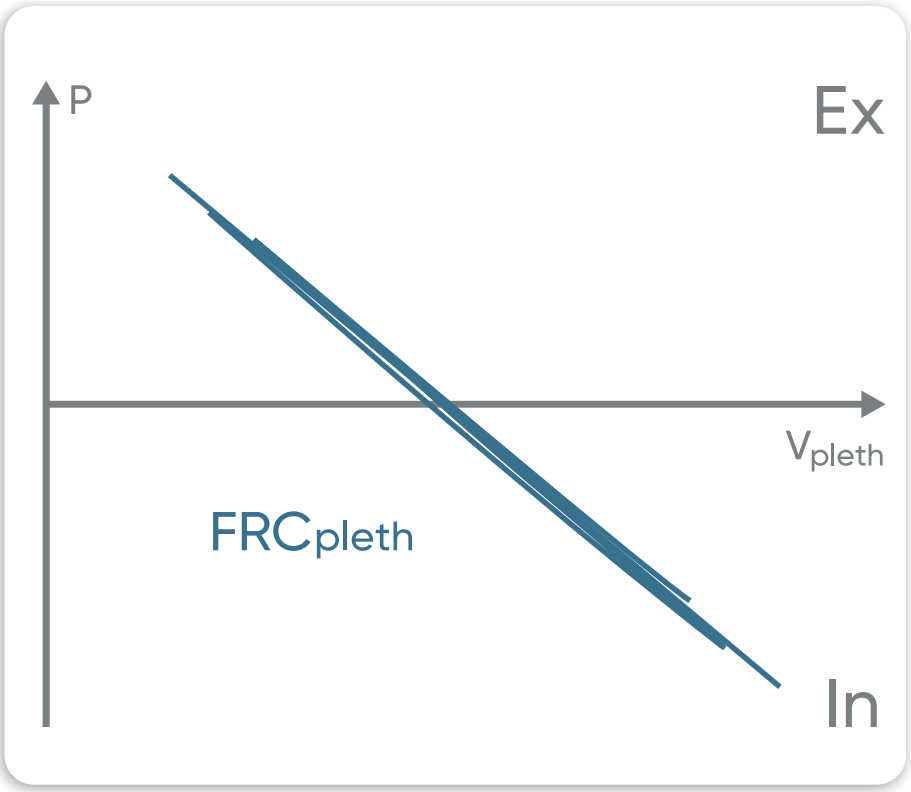


Maniobra respiratoria

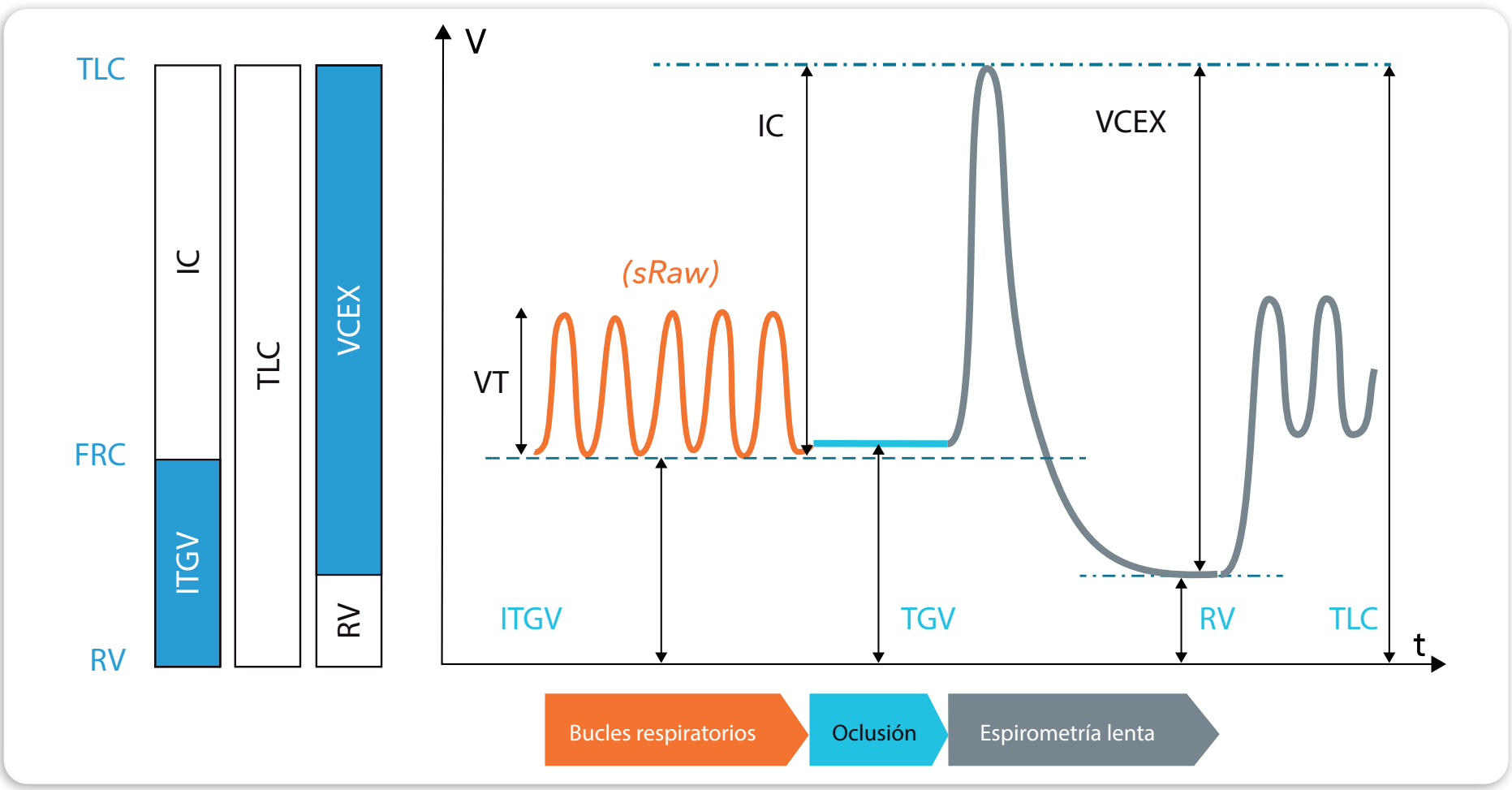


	Parámetros	Descripción
Resistencias (específicas) de las vías aéreas	sRaw (sReff, sRtot, sR0.5)	Resistencia específica de las vías aéreas
	sGaw = 1/sRaw	Conductancia específica de las vías aéreas
	Raw (Reff, Rtot, R0.5)	Resistencia vía aérea
	Gaw = 1/Raw	Conductancia de las vías aéreas
Volúmenes pulmonares absolutos	TLC	Capacidad pulmonar total
	ITGV	Capacidad residual funcional (ajustada para errores de conexión)
	TGV	Volumen de gas torácico (Medido durante la oclusión)
	RV	Volumen residual
Espirometría lenta	VCEX	Capacidad vital espiratoria
	IC	Capacidad inspiratoria
	VT	Volumen corriente

Bucles típicos en pacientes sanos y con patologías


Obstrucción

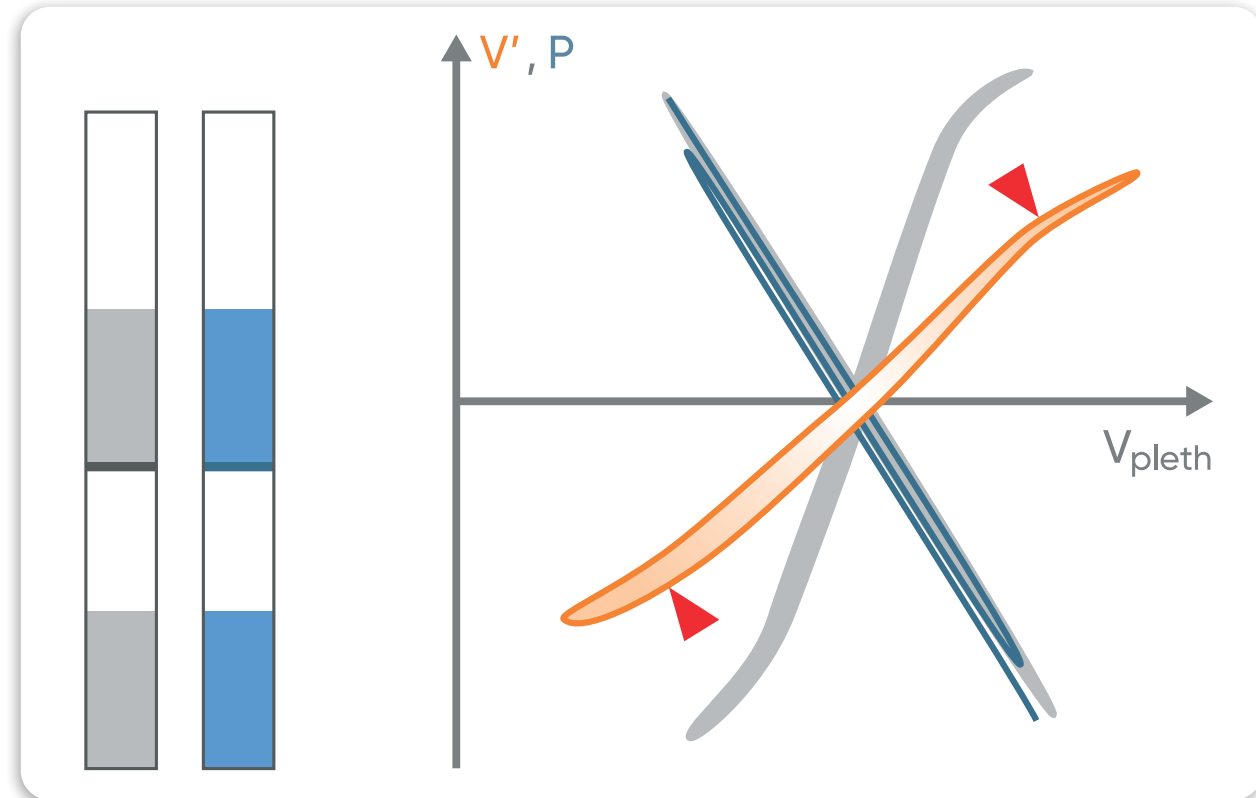


Sano

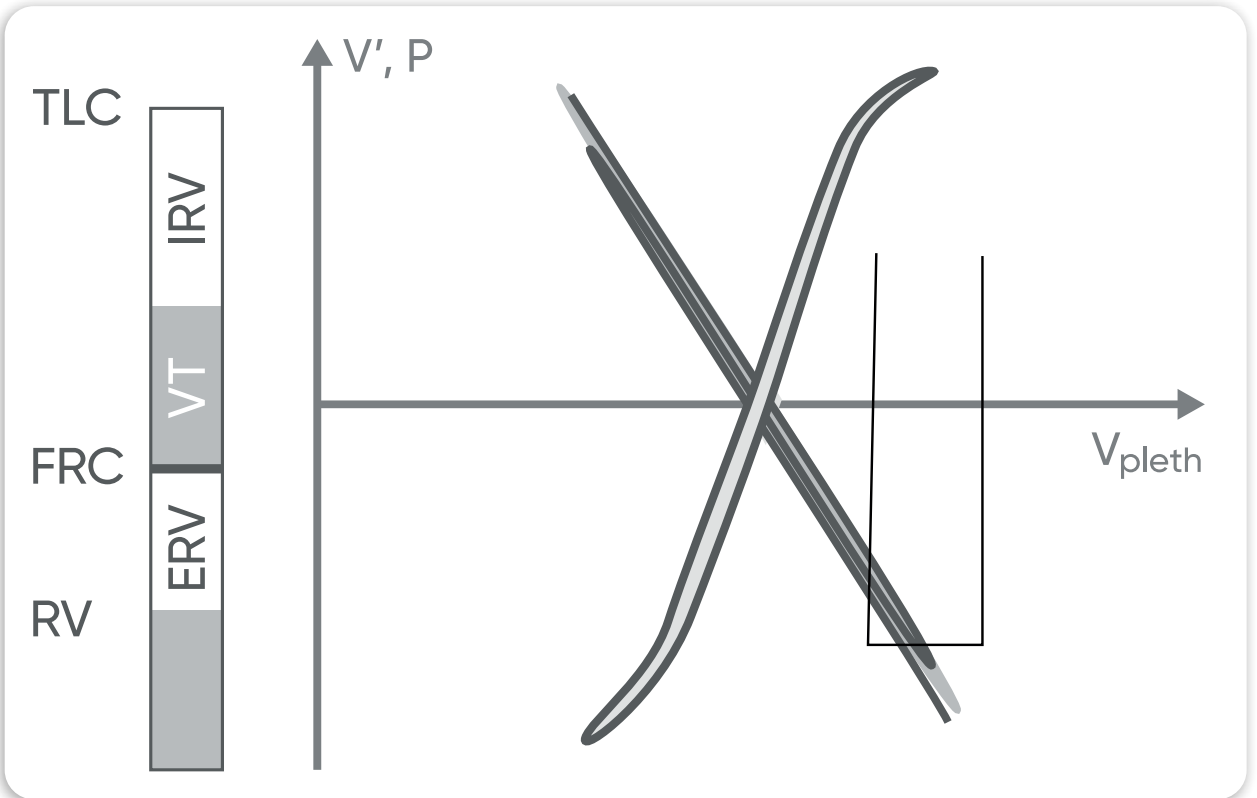


Restricción

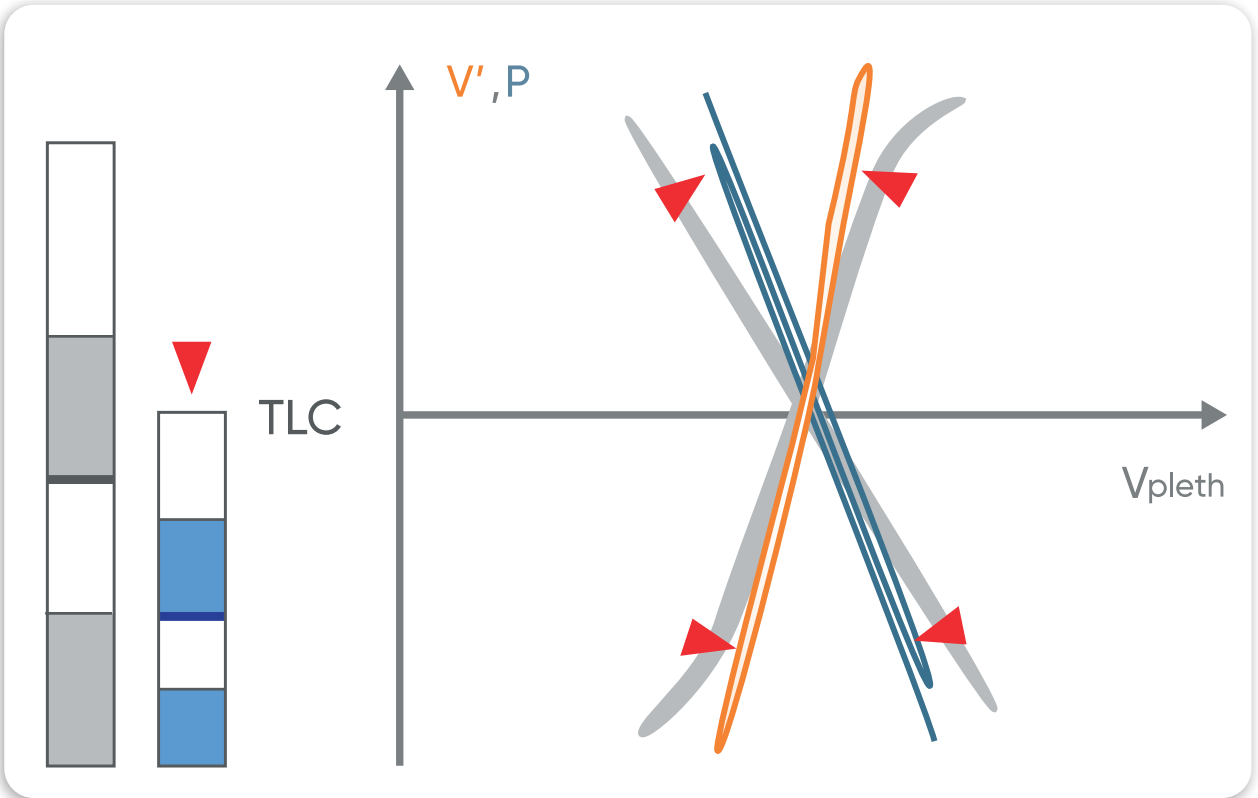

Distribución

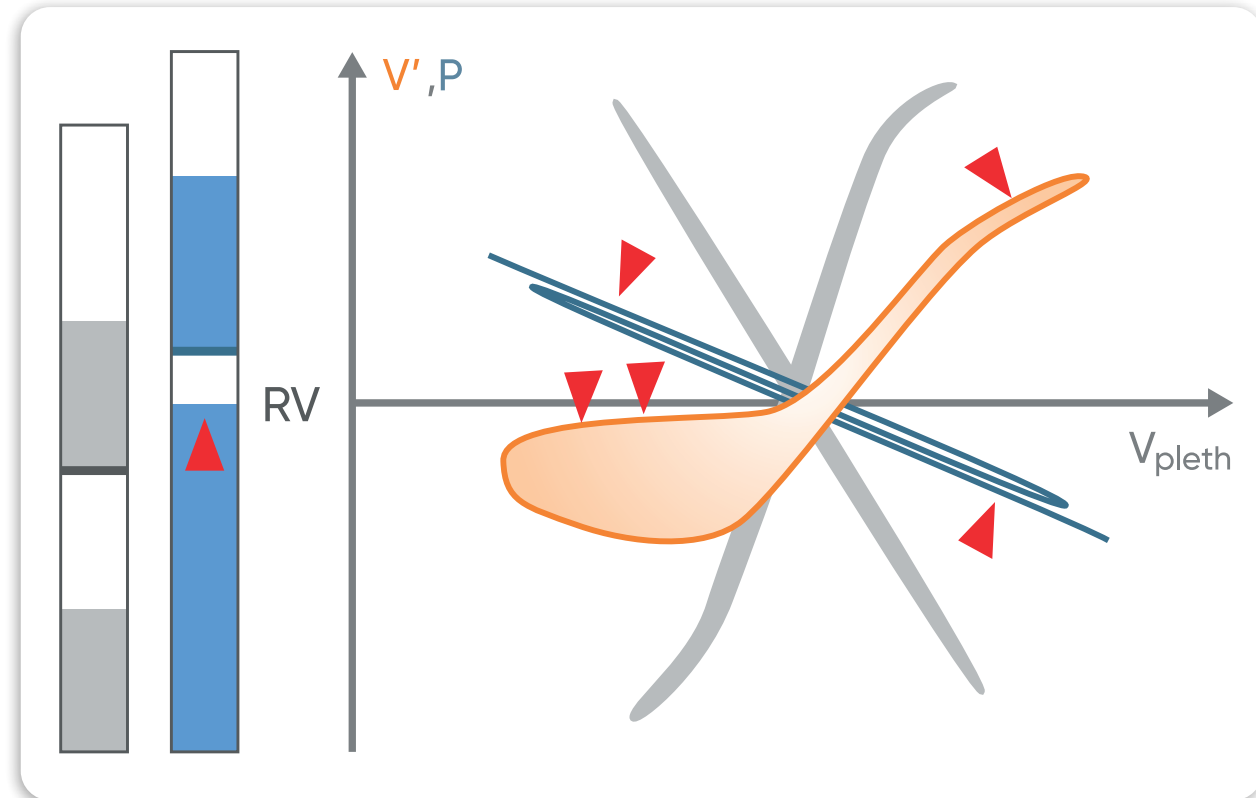

Diafragma

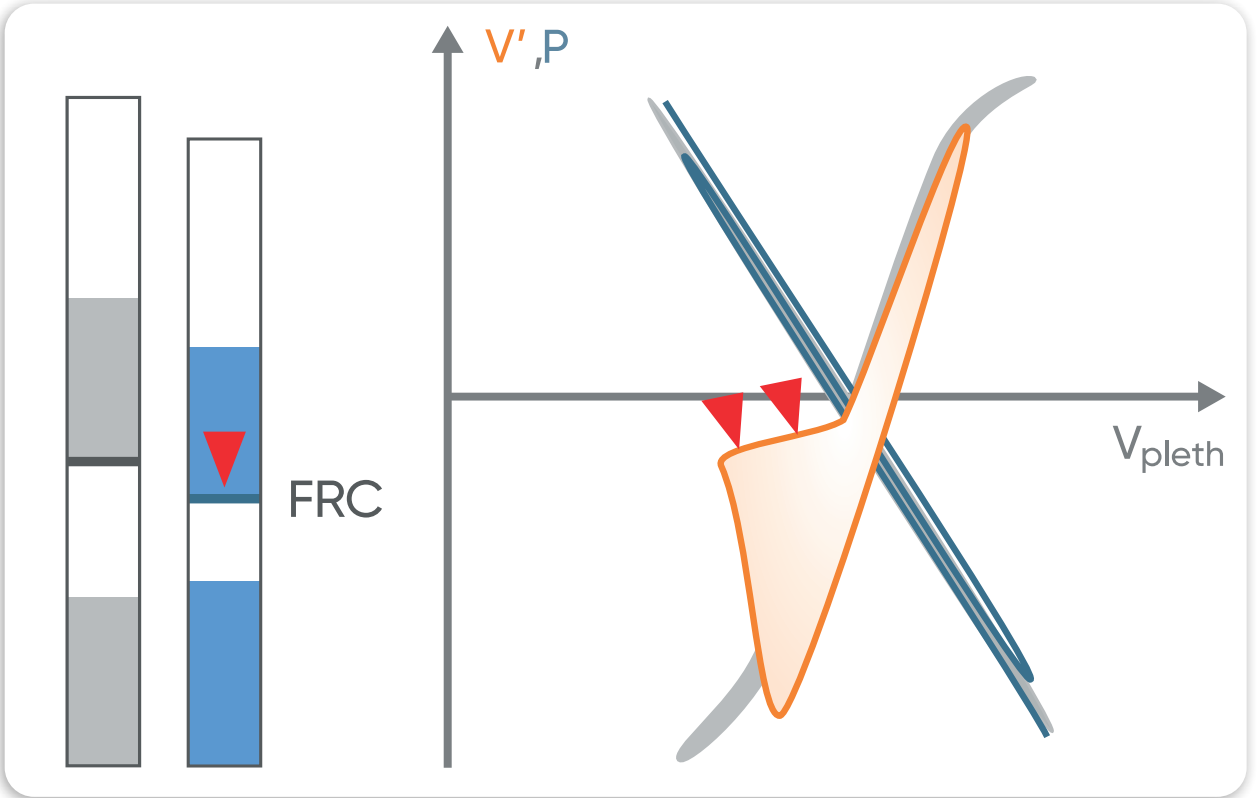

Estenosis

